

## Quick guide Sensitest Zwangerschapstest HCG Dipstick

### Doel en werking van de test

Met de Sensitest zwangerschapstest HCG Dipstick kun je op een eenvoudige en betrouwbare manier vaststellen of je zwanger bent. Zodra je zwanger bent, produceert je lichaam het zwangerschapshormoon Humaan Chorion Gonadotrofine (hCG). De hoeveelheid hCG verdubbelt elke 2 à 3 dagen en bereikt een piek na ongeveer 7 à 12 weken zwangerschap. Deze test detecteert het zwangerschapshormoon in je urine tot 4 dagen voor je te verwachten menstruatie.

### Benodigheden

#### Benodigheden



#### Benodigheden

- 1 Sensitest Zwangerschapstest
- Opvangbakje
- Klok met secondewijzer
- Vlakke ondergrond


Zie afbeelding hiernaast.

## Vorbereiding

Zorg voor het uitvoeren van de test voor een schoon opvangbakje voor de urine, schone handen en een schone ondergrond waar je de test kunt neerleggen nadat het de urine heeft opgenomen.

## Het uitvoeren van de test in zes stappen

### Stap 1

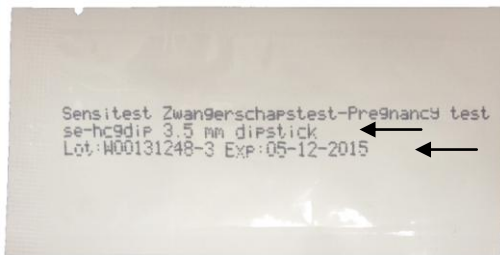

Neem een gesloten verpakking en controleer of er Sensitest **Zwangerschapstest** op staat. Controleer ook of de houdbaarheidsdatum nog **niet** verstreken is. Gebruik géén test waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Zie afbeelding 1.

Afbeelding 1. Folieverpakking Sensitest zwangerschapstest



## Stap 2

Vang wat urine op in een schoon en droog bakje. Zet deze neer op een vlakke ondergrond.

Zie afbeelding 2.



Afbeelding 2.  
Bakje met opgevangen urine

## Stap 3

Maak de verpakking van de test open met schone en droge handen.

Zie afbeelding 3.



Afbeelding 3.  
Opengemaakte folieverpakking

## Stap 4




Afbeelding 4. Sensitest zwangerschapstest Hcg-dipstick

Pak de test strip aan de blauwe zijde vast waar de lichtblauwe letters HCG op de strip staan.

Zie afbeelding 4.

## Stap 5

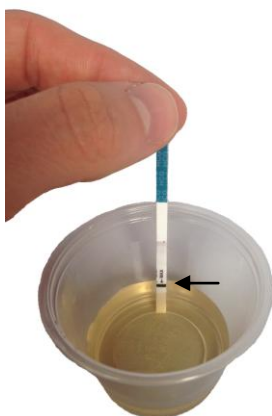

Afbeelding 5. De zwangerschapstest in het bakje met urine

Dompel de andere zijde van de teststrip ongeveer **5 seconden** in het bakje met urine. Echter **niet** dieper dan het streepje onder de letters MAX.

Zie afbeelding 5.

## Stap 6



Afbeelding 6. Zwangerschapstest op vlakke ondergrond

Leg de test neer op een vlakke, droge en schone ondergrond.

Na enkele seconde zie je de kleurstof met de urine door de test heen lopen. Zie je dit niet houd dan de test nogmaals 5 seconden in de urine.

Wacht **5 tot 10 minuten** om het resultaat af te lezen. Het is belangrijk dat de achtergrond geen verkleuringen meer laat zien.

## Het aflezen van de testuitslag

### Negatieve testuitslag



Afbeelding 8.  
Negatieve testuitslag

Het resultaat is **negatief** als er 1 roze lijn verschijnt. Dit is de controlelijn (C) om te zien of de test juist is uitgevoerd. Indien testlijn (T) niet zichtbaar heeft uw lichaam nog niet genoeg Hcg aangemaakt om uw zwangerschap aan te tonen. (Doe nog een test na 1 of 2 dagen.) Of u bent niet zwanger.


### Positieve testuitslag



Afbeelding 9.  
Positieve testuitslag

Het resultaat is **positief** als er twee roze lijnen te zien zijn van dezelfde kleur of als de testlijn (T) iets lichter is dan de controlelijn (C).

### Geen testuitslag

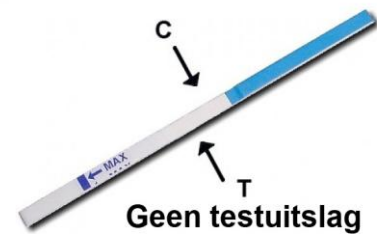

Afbeelding 10.  
Geen testuitslag

Er is geen testuitslag als er geen testlijn (T) en geen controlelijn (C) te zien is. Ga terug naar stap 5, om de test nogmaals 5 seconden in de urine te houden.